


# 瑞特採血筆 (未滅菌) 使用說明書

## Rightest® Lancing Device GD500

採血筆是為單一個人使用，並且可以重覆使用之採血筆。它可以自動地將採血針注入指尖並立即撤回取得微血管血樣，供血糖監測或其它需求1~2滴血樣之測試用。可調整注入深度的設計，使用者可依個人皮膚厚度的不同，選擇適合的注入深度。

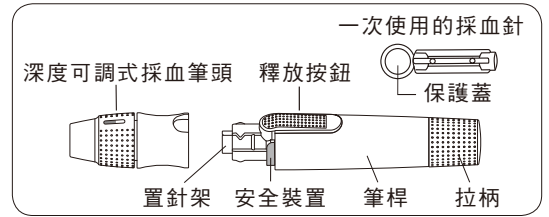

### 特點:

- 本採血筆有特殊的安全裝置，拉開筆頭時，置針架已定位於可裝針狀態，可防止因誤擊釋放鈕而被採血針所刺傷。
- 本採血筆具拉柄退針設計，可避免移除使用過之採血針時被刺傷。(請參照步驟圖11)
- 精確與穩定的筆身結構使採血針在作動時不會晃動，減少採血之疼痛。
- 適當之彈力與拉力，方便使用者使用。
- 新穎之採血深淺辨識設計，方便使用者調整。

### 注意事項:

- 安裝採血針於採血筆或打開採血筆筆蓋時，請小心避免被針刺傷。
- 採血筆是為單一個人使用。為了避免接觸之污染，請不要多人共用採血筆。
- 為了安全起見及預防交叉污染，請將取下的使用過之採血針丟棄於專門置放針或生化危險物的容器內。
- 除了圖示操作步驟外，請勿自行拆解採血筆。
- 採血筆包含小零件，有可能對小孩造成窒息之危險，請勿吞食。

### 使用方式:

請先用肥皂及溫水清洗您的雙手並且完全擦乾您的雙手。溫暖您的雙手將有助於血樣的取得。按照以下的步驟指示，每一步驟相對應於相同之號碼圖示。

1. 一手握住採血筆頭，另一手握住筆桿。稍微向下施力，筆頭與筆桿分離後，再向兩側拉出。
2. 拉開採血筆頭。
3. 將採血針放入採血筆的置針架內。
4. 旋轉取下採血針保護蓋，並保留保護蓋。
5. 壓回關上採血筆筆頭。
6. 旋轉筆頭選擇深度並確認選定深度對準視窗，以便取適合的血量。深度設定是以個人皮膚狀況為基準：“ ”為柔軟或較薄皮膚用；“ ”為一般皮膚用；“ ”為較厚皮膚用。
7. 一手握住採血筆，另一手將採血筆拉柄後拉到底，採血筆將會扣起釋放按鈕。放開拉柄，此時拉柄會自動回到原本接近釋放按鈕的位置。
8. 將採血筆對準並貼緊指尖以備採血，然後按下釋放按鈕進行採血。(建議最佳刺針位置為中指或無名指)
9. 拉開採血筆頭，不要碰觸採血針，握住採血筆直接將採血針朝採血針保護蓋按下。
10. 先按住釋放按鈕，另一手將採血筆拉柄往後拉到底，可將已蓋上保護蓋的採血針安全退出。
11. 將已使用過的採血針丟棄於不會刺傷他人的容器內。
12. 蓋回採血筆筆頭。

### 清潔:

使用乾淨的濕布擦拭採血筆的表面。為了避免採血筆內部的彈簧生鏽，請不要將採血筆直接用水沖洗或是將採血筆放於洗碗機裏沖洗。注意將血量調整旋轉鈕從採血筆拉開後，易造成水的浸入。

### 保證:

華廣生技公司提供您自購買採血筆的產品二年的保固。對於製造者在原料上、製程上的不良及在一般使用的狀況下受損或故障，我們將會為您做免費的採血筆之維修及更換。此保證並不包括使用上的錯誤或濫用。此保證提供您合法的權利及其他在法律範圍下的合法權利。

### 客戶服務:

我們誠懇地希望能夠提供所有的客戶完整及貼心的服務，請閱讀所有的相關指示，以確保您能夠依正確的測試步驟操作。

如有任何疑問或建議，歡迎您隨時撥我們的免付費客服電話：0800-371-688，或發電子郵件到 [info@bionime.com](mailto:info@bionime.com) 與我們連絡。

瑞特採血筆(未滅菌)許可證字號：衛署醫器製壹字第001990號

**BIONIME**

製造商：華廣生技股份有限公司大慶廠  
台中市南區大慶街二段100號  
免付費客服電話：0800-371-688  
傳真：04-22617586  
E-mail: [info@bionime.com](mailto:info@bionime.com)  
Website: [www.bionime.com](http://www.bionime.com)

**EC REP**  
Bionime GmbH  
Tramstrasse 16  
9442 Berneck  
Switzerland  
E-mail: [info@bionime.ch](mailto:info@bionime.ch)

發行日期: 2017-04



101-3GD500-023  
TW

