
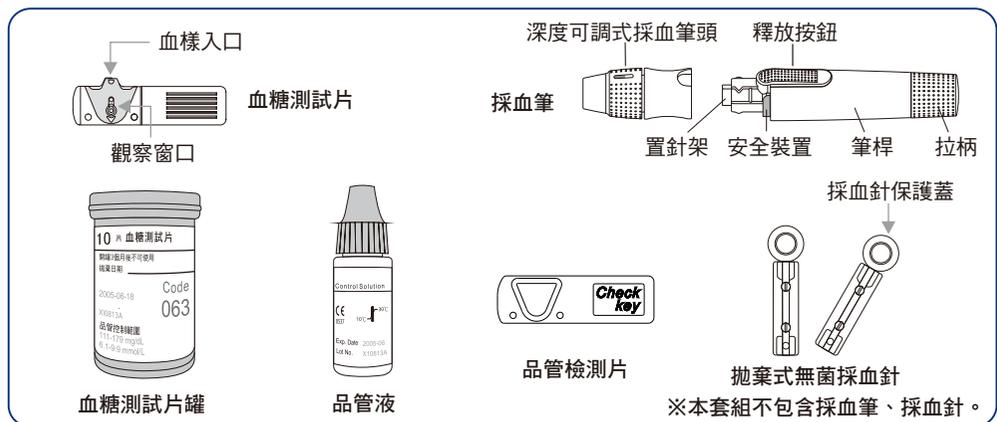



瑞特血糖監測系統

瑞特血糖測試儀 - 簡易使用說明

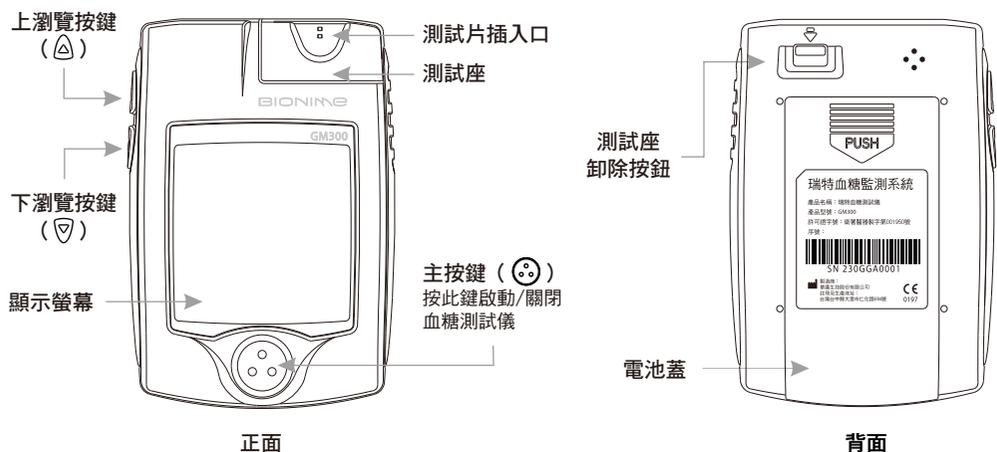

1> 安裝電池

1) 打開血糖測試儀背面的蓋子，依次裝入兩顆電池，並確定其被裝置在正確的方向。(電池室內有電池正負極圖示，請參照安裝)

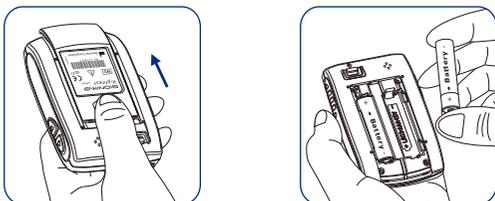

2> 安裝測試座

- 1) 將血糖測試儀翻回正面，並手持測試座靠近於血糖測試儀右上方的位置，依①方向沿卡溝向下滑入，再依②方向下壓。
- 2) 下壓測試座直到測試座穩固地卡入血糖測試儀上。





3> 血糖測試儀設定 - 設定日期、時間及單位

- 1) 按主按鍵「⊕」啟動血糖儀。
- 2) 按住主按鍵「⊕」五秒直到進入設定模式。在進入設定模式前你將會看到電源關閉的動作，此時請繼續按住按鈕，直到進入設定模式，螢幕上之年份格式會閃爍。
- 3) 按上瀏覽按鍵「△」或下瀏覽按鍵「▽」更改年份。
- 4) 按主按鍵「⊕」確認該年份並切換到月份設定。




- 5) 重複步驟3及4更改日期、時間格式，小時、分鐘的設定及測量的單位。按主按鍵「⊕」確認測量的單位後即完成設定。

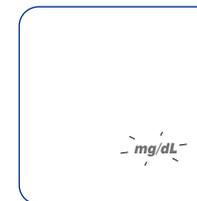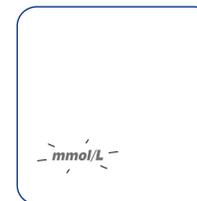


4 準備採血筆

- 1) 拉開採血筆筆頭。
- 2) 將採血針放入採血筆的置針架內。
- 3) 旋轉取下採血針保護蓋，並保留保護蓋。

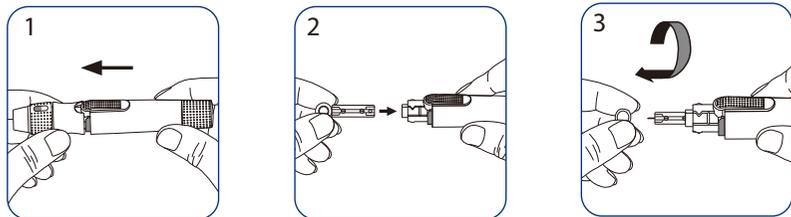


- 4) 壓回關上採血筆筆頭。
- 5) 旋轉筆頭選擇深度並確認選定深度對準視窗，以便取適合的血量。深度設定是以個人皮膚狀況為基準：“□□”為柔軟或較薄皮膚用；“□□□”為一般皮膚用；“□□□□”為較厚皮膚用。
- 6) 一手握住採血筆，另一手將採血筆拉柄後拉到底，採血筆將會扣起釋放按鈕。放開拉柄，此時拉柄會自動回到原本接近釋放按鈕的位置。

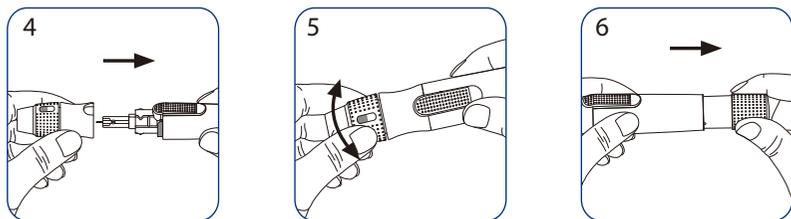


5 進行測量

- 1) 請先清洗並且完全擦乾您的雙手。從測試片罐內取出新的測試片，並立即蓋上測試片罐的蓋子。
- 2) 如圖示，將測試片有藍色蓋片那一面，面向使用者且箭頭向下，插入測試座入口，並將測試片推進測試座底部直到卡住停止。此時血糖測試儀會自動開機，並同時聽到一聲「嗶」。

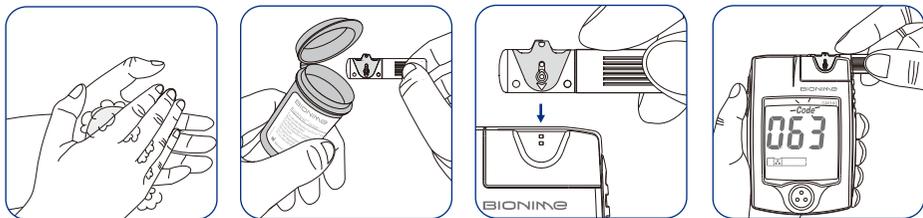

- 3) 此時血糖測試儀螢幕會出現閃爍的校正碼(code)，請確認測試片罐標籤上的校正碼(code)和血糖測試儀螢幕上的校正碼(code)是相同的。
- 4) 當「」信號開始閃爍時，就表示可以開始採血樣。握住採血筆緊貼您的指尖，然後按住採血筆上的釋放按鈕採血樣。

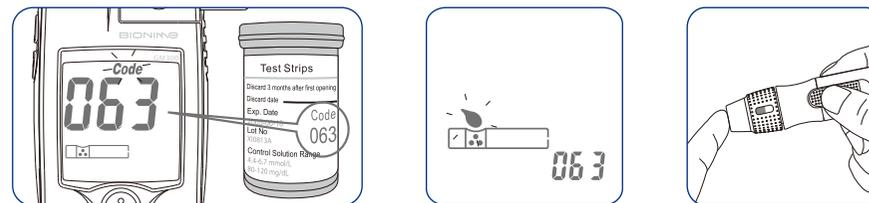

- 5) 用手擠壓您的指尖以便採一滴血樣，我們的血糖測試儀只需要極微量的血樣，建議採約1.4~2.5μl的血樣量來做測試，注意請不要擠壓太多的血量，以避免污染測試座。




血樣大小範圍




建議採血量為1.4~2.5μl。過多的血量樣(例如超過4.0μl可能會污染測試座。

- 6) 將您的手指血樣接觸並停留測試片血樣入口，直到聽到嗶一聲及看到觀察窗口完全充滿血液為止。如果觀察窗口沒有完全被血液充滿或沒有啟動測試。請即刻丟棄此測試片，並用新測試片重複上述步驟。
- 7) 當血樣採入測試片後，您會看到螢幕上顯示倒數計時的時間，此即表示血糖測試儀正在測量您的血糖值。8秒後即顯示您的測試結果，有關測量結果，如需更詳細的說明請參考瑞特血糖測試儀使用手冊。

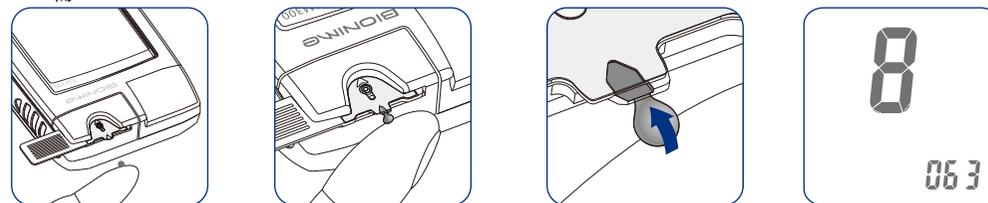

- 8) 拔開採血筆筆頭，將留存的採血針保護蓋放在桌上，以握筆的方式握住採血筆，將針頭插入採血針保護蓋，然後丟棄在不刺傷他人的容器內。
- 9) 一手按住筆桿的釋放鈕另一手將拉柄往後拉，則可順利將使用過後的採血針退出。
- 10) 將使用過的採血針棄置於防止穿刺的容器。
- 11) 完成以上測試後，蓋上採血筆頭。

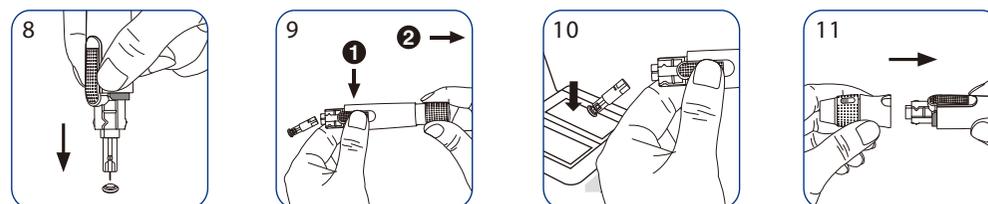

詳細的血糖儀操作步驟及測量結果說明請參閱使用手冊。

BIONIME

製造廠/藥商名稱: 華廣生技股份有限公司大慶廠
製造廠/藥商地址: 台中市南區大慶街二段100號
免付費客服電話: 0800 371 688
傳真 04 2261 7586
E-mail: info@bionime.com
Website: www.bionime.com

EC REP

Bionime GmbH
Tramstrasse 16
9442 Berneck
Switzerland
E-mail: info@bionime.ch

CE
0197

101-3GM300-064
TW